


Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet

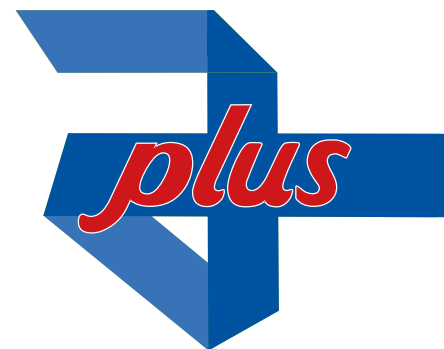

MyClean® DS Schnelldesinfektion



- Alkoholische Schnelldesinfektion
- Wirkt bakterizid (inkl. MRSA), tuberkulozid (inkl. M.-terrae) und levurozid
- Wirkt begrenzt viruzid (HBV/HIV, BVDV (HCV), Vaccinia-, Influenza-/Grippe-Viren) (alle behüllten Viren gemäß aktueller RKI-Empfehlung)
- Wirksam gegen Noro-, Rota-, Adeno-, SV40-Viren
- Für die Tränkung von Tüchern geeignet
- Praxisgerechte Einwirkzeiten
- Schnelles Trocknen
- VAH-gelistet




Anwendung:

Gebrauchsfertige Lösung zur Desinfektion von alkohol- und wischbeständigen Oberflächen von Medizinprodukten sowie Gegenständen in Kliniken, Praxen, patientennahem Umfeld (Vorsicht bei alkoholempfindlichen Oberflächen wie z. B. Acrylglas, Polycarbonatglas etc.). Materialbeständigkeit ggf. an unauffälliger Stelle prüfen. Flächen vollständig abwischen und während der gesamten Einwirkzeit feucht halten. Ggf. mit einem hygienisch sauberen Tuch nachwischen. Sichtbare Verschmutzungen vor der Desinfektion entfernen.

Ausführungen:

MyClean® DS – Schnelldesinfektion

Artikelbeschreibung	Duft	Pack.-Inhalt	Art.-Nr.	EAN	PZN	Pack/VE
Schnelldesinfektion	Orange	10L	79617	4046153116256	10297739	1
Schnelldesinfektion	Lemon	10L	79618	4046153116270	10305858	1
Schnelldesinfektion	Pfirsich	10L	79619	4046153116294	10305864	1
Schnelldesinfektion	Apfel	10L	79620	4046153116317	10305870	1
Schnelldesinfektion	Vanille	10L	79621	4046153116232	10305841	1
Schnelldesinfektion	Sun	10L	79622	4046153115747	10305835	1
Schnelldesinfektion	Sunrise	10L	79652	4046153120000	11092376	1
Schnelldesinfektion	Blue Lagoon	10L	79653	4046153120024	11092382	1
Schnelldesinfektion	Tropical Beach	10L	79654	4046153120048	11092399	1
Schnelldesinfektion	Granat- apfel	10L	79697	4046153125302	14352725	1

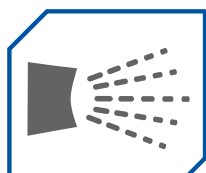

MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1–7
29643 Neuenkirchen – Germany

TD-MyClean-DS-Schnelldesinfektion-Duft-20181207

Technisches Datenblatt

Technical Data Sheet



MyClean® DS Schnelldeinfektion

Einwirkzeiten:

Bakterizid, levurozid (EN 16615, hohe Belastung):	1 Minute
Bakterizid (inkl. MRSA), levurozid, TBC (inkl. M.-terrae) (EN 13624, EN 13727, VAH, hohe Belastung):	1 Minute
Adeno-Viren (EN 14476, geringe Belastung):	15 Minuten
Noro-Viren (EN 14476, geringe Belastung):	5 Minuten
Rota-Viren (EN 14476, geringe Belastung):	30 Sekunden
Vaccinia Elstree/BVDV (DVV/RKI) (10 % FKS):	30 Sekunden
SV40 (DVV/RKI, geringe Belastung):	5 Minuten

Zusammensetzung: 100 g Lösung enthalten:
Wirkstoffe: 43 g Ethanol, 0,05 g Didecyldimethylammoniumchlorid


Qualitätssicherung: MPG, Richtlinie 93/42/EWG, VAH, Biozidverordnung
CE-Kennzeichnung auf allen Verpackungseufen
CE-Klassifizierung: Klasse IIa

Biozid-Nr.: N-63770

Verwendbarkeit:  3 Jahre

Standzeit:  nach dem Öffnen innerhalb von 12 Monaten verbrauchen.

Symbole:      Achtung

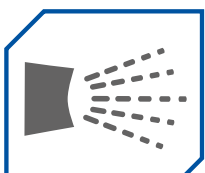

MaiMed GmbH
Robert-Koch-Str. 1-7
29643 Neuenkirchen – Germany

TD-MyClean-DS-Schnelldeinfektion-Duft-20181207