

## Bedienungsanleitung Art. 527 -Schwerlast-Vakuum-Matratze-

1. Vakuum-Matratze ausbreiten
2. Granulat gleichmäßig verteilen
3. Gurte seitlich auslegen
4. Patient auf Vakuum-Matratze auflegen
5. Gurte schließen
6. Vakuum-Matratze seitlich und im Kopfbereich eng anmodellieren
7. Vakuum-Matratze gleichmäßig absaugen
8. Ventil schließen und für die Dauer des Transports geschlossen halten



Rettungsprodukte GmbH & Co. KG  
Rudolf-Diesel-Str. 7  
53859 Niederkassel - Mondorf  
Tel.: 0049-228-9711897  
Fax: 0049-228-9711899



## Reinigungs- und Desinfektionshinweise:

- Desinfektionsmittel nur gemäß der Vorgabe des Herstellers verwenden, bei Überdosierung wird keine Haftung für Schäden am Material übernommen !

## ➤ Anwendungs- und Sicherheitshinweise:

- Vor dem Immobilisieren des Patienten von der Vollständigkeit der VM überzeugen und das Ventil auf Funktionsfähigkeit überprüfen
- Nach dem Absaugen der VM stets darauf achten, dass das Ventil geschlossen bleibt
- Die Gurte nach der Absaugung nochmals nachkorrigieren, um einen sicheren Halt für den Patienten zu gewährleisten
- Ausreichend Personal (mindestens 3 Personen) zum sicheren Transport des Patienten einsetzen
- Beim Lufttransport eines Patienten mit der VM in großen Höhen ist ein Druckausgleich herzustellen, um die volle Wirksamkeit der VM zu gewährleisten
- Die Gewährleistung auf die Vakuummatratze beträgt 24 Monate
- Bei kleineren und gut sichtbaren Beschädigungen kann mit Hilfe unseres Reparatur-Sets (Art. Nr.: 604) die Funktionsfähigkeit wieder hergestellt werden (Hierbei ist die Reparaturanweisung genau zu beachten, für Fehlanwendungen können wir keine Haftung übernehmen!)
- Bei größeren oder nicht erkennbaren Beschädigungen der VM, sollte diese unverzüglich zu uns gesandt werden, um eine ordnungsgemäße Reparatur und Wiederherstellung der Funktion zu gewährleisten

Bei eventuellen Rückfragen wenden Sie sich bitte an

Dan F. Schragen  
-Vertriebsleiter-



Rettungsprodukte GmbH & Co. KG  
Rudolf-Diesel-Str. 7  
53859 Niederkassel – Mondorf  
Tel.: 0049-228-9711897  
Fax: 0049-228-9711899

